

ZESTAWIENIE WARUNKÓW POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK W ZALEŻNOŚCI OD ZLECONEGO BADANIA

PARAMETR	MATERIAŁ	WARUNKI POBRANIA	TEMP. I CZAS PRZECHOWYWANIA	TEMP. I CZAS TRANSPORTU	MIN. ILOŚĆ MATERIAŁU	CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK *) (DNI ROBOCZE)
Witamina D • 25(OH)D • 24,25(OH) ₂ D ₃ • 3-epi-25(OH)D ₃	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	7
Aminokwasy	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	1 dobrze nasączone pole na bibule (ok. 50 µl krwi)	10
Aminokwasy +Alloizoleucyna	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Acylokarnityny	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	1 dobrze nasączone pole na bibule (ok. 50 µl krwi)	10
Homocysteina	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	po 12-godzinym poście	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	7
3-O-metylodopa	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	rano na czczo	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega	sucha kropla krwi pobrana na bibułę**)	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Deficyt arginazy (arginina/ornityna)	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 5 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Indeks glutationu	sucha kropla krwi pobrana na bibułę***)	po 12-godzinym poście	2-8°C do 7 dni w torebce aluminiowej z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 5 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10

DAO	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	po 3-godzinny suszeniu wysłać bezzwłocznie	temperatura otoczenia, do 48h	4 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 200 µl krwi)	10
LPC– pochodne VLCFA	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Hemoglobina glikowana (HbA1c)	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	o dowolnej porze	-20°C do 7 dni	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Metoksykatecholaminy • Metanefryna • Normetanefryna • 3-Metoksytyramina	osocze (EDTA)	rano na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml osocza	7
Witamina D • 25(OH)D • 24,25(OH) ₂ D ₃ • 3-epi-25(OH)D ₃	surowica	o dowolnej porze	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	7
Aminokwasy	surowica	rano na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	10
Homocysteina	surowica	po 12-godzinny poście	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	7
Witamina A	surowica	o dowolnej porze, ale nie na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	10
Witamina E	surowica	o dowolnej porze, ale nie na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	10
Koenzym Q10	surowica	o dowolnej porze, ale nie na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	10
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega	krew pełna (EDTA)	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	2 ml krwi	10
PEth	krew pełna (EDTA)	o dowolnej porze, przynajmniej 24 h od spożycia alkoholu	-20°C do 5 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	2 ml krwi	10
Kwasy organiczne (jakościowo)	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml moczu	10

Puryny i pirymidyny	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml moczu	20
SAICAR i S-Ado i AICAR (jakościowo)	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml moczu	20
Analiza toksykologiczna	mocz	o dowolnej porze, ale nie później niż do 72h od momentu potencjalnego narażenia na substancję	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml moczu	10

Objaśnienia:

- *) Liczony od chwili przyjęcia materiału przez Laboratorium
- **) Bibuła nasączona roztworem zabezpieczającym przed rozkładem kwasów tłuszczowych
- ***) Bibuła nasączona roztworem zabezpieczającym przed redukcją glutationu

UWAGA: Szczegóły dotyczące przygotowania pacjenta przed pobraniem są dostępne w poszczególnych instrukcjach pobrań