

ZESTAWIENIE WARUNKÓW POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK W ZALEŻNOŚCI OD ZLECONEGO BADANIA

PARAMETR	MATERIAŁ	WARUNKI POBRANIA	TEMP. I CZAS PRZECHOWYWANIA	TEMP. I CZAS TRANSPORTU	MIN. ILOŚĆ MATERIAŁU	CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK *) (DNI ROBOCZE)
Witamina D • 25(OH)D • 24,25(OH) ₂ D ₃ • 3-epi-25(OH)D ₃	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	7
Aminokwasy	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	1 dobrze nasączone pole na bibule (ok. 50 µl krwi)	10
Aminokwasy +Alloizoleucyna	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Acylokarnityny	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	1 dobrze nasączone pole na bibule (ok. 50 µl krwi)	10
Homocysteina	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	rano na czczo	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	7
3-O-metylodopa	sucha kropla krwi pobrana na bibułę	rano na czczo	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega	sucha kropla krwi pobrana na bibułę**)	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 7 dni w woreczku strunowym z osuszaczem	temperatura otoczenia, do 7 dni	2 dobrze nasączone pola na bibule (ok. 100 µl krwi)	10
Metoksykatecholaminy • Metanefryna • Normetanefryna • 3-Metoksytyramina	osocze (EDTA)	rano na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml osocza	7

Witamina D • 25(OH)D • 24,25(OH) ₂ D ₃ • 3-epi-25(OH)D ₃	surowica	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	7
Aminokwasy	surowica	rano na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	10
Homocysteina	surowica	rano na czczo	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	7
Witamina A	surowica	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	7
Witamina E	surowica	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	7
Koenzym Q10	surowica	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	1 ml surowicy	20
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega	krew pełna (EDTA)	rano na czczo lub 2-4 godziny po posiłku	-20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	2 ml krwi	10
Kwasy organiczne (jakościowo)	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml moczu	10
Puryny i pirymidyny	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml moczu	20
SAICAR i S-Ado i AICAR (jakościowo)	mocz	2-4 godziny po posiłku	2-8°C do 48 h lub -20°C do 7 dni	pojemnik z wkładami chłodzącymi, do 24h	20 ml moczu	20

Objaśnienia:

*) Liczony od chwili przyjęcia materiału przez Laboratorium

**) Bibuła nasączona roztworem zabezpieczającym przed rozkładem kwasów tłuszczowych

UWAGA: Szczegóły dotyczące przygotowania pacjenta przed pobraniem są dostępne w poszczególnych instrukcjach pobrań